

# DIMEVET AI

## Manual do Usuário

---

Guia passo a passo — do cadastro à análise por inteligência artificial.

# Bem-vindo ao DIMEVET AI

## O que é

O DIMEVET AI é uma ferramenta de APOIO à decisão clínica veterinária. A partir da anamnese, de exames laboratoriais e de imagens diagnósticas, a inteligência artificial gera, em minutos, diagnósticos diferenciais, laudos e triagens — sempre para auxiliar o médico veterinário.

**Importante:** conforme as diretrizes do CFMV, o diagnóstico e o laudo são atos exclusivos e de responsabilidade do médico veterinário. A análise da IA é um apoio e não substitui o exame físico nem o julgamento profissional. Valide sempre o conteúdo gerado.

## Neste manual

- 1. Abertura do site
- 2. Cadastro de conta
- 3. Login
- 4. Boas-vindas (primeiro acesso)
- 5. Painel (dashboard)
- 6. Novo caso — Diagnóstico clínico
- 7. Novo caso — Laudo de exame
- 8. Novo caso — Triagem rápida
- 9. Resultado da análise

# 1 Abertura do site

Acesse [www.dimevetai.com.br](http://www.dimevetai.com.br). A página inicial apresenta as duas modalidades (diagnóstico e laudo) e a triagem rápida. Para começar, clique em “Criar conta grátis”. Você também pode ver um exemplo de análise e de laudo antes de se cadastrar.



## 2 Cadastro de conta

Preencha nome completo, e-mail e uma senha. O campo CRMV é obrigatório — a plataforma é de uso exclusivo do médico veterinário. Marque o aceite dos Termos de Uso e clique em “Criar conta grátis”. Um e-mail de confirmação é enviado; confirme para ativar a conta. O teste grátis inclui 5 análises por 15 dias.



### Comece grátis a usar inteligência artificial na sua clínica

Crie sua conta em segundos e ganhe 5 análises gratuitas, válidas por 15 dias a partir do cadastro, para testar a plataforma com seus próprios casos clínicos.

© 2026 DIMEVET AI — Feito para médicos veterinários

#### Criar conta grátis

Preencha os dados abaixo para começar a usar a plataforma.

**Nome completo**

**E-mail**

**CRMV**

A plataforma é de uso exclusivo do médico veterinário. Informe seu registro no CFMV.

**Senha**

☐ Li e aceito os [Termos de Uso e Privacidade](#) e declaro estar ciente de que, conforme as diretrizes do **CFMV**, o DIMEVET AI é uma ferramenta de **apoio**: o diagnóstico e o laudo são atos exclusivos e de responsabilidade do médico veterinário, que deve validar todo conteúdo gerado pela plataforma.

**Criar conta grátis**

★ Ao criar a conta você ganha 5 análises gratuitas, válidas por 15 dias. Após esse período, o teste grátis expira.

Já tem conta? [Entrar](#)

## 3 Login

Após confirmar o e-mail, entre com e-mail e senha em “Entrar na plataforma”. Caso ainda não tenha confirmado, é possível reenviar o e-mail de confirmação a partir desta tela.

**DIMEVET AI**

### Diagnóstico Inteligente em Medicina Veterinária

Casos clínicos, exames laboratoriais e imagens diagnósticas analisados por inteligência artificial em minutos.

© 2026 DIMEVET AI — Feito para médicos veterinários

#### Entrar na plataforma

Use as credenciais fornecidas pelo administrador da sua clínica.


E-mail

Senha

**Entrar**

Ainda não tem conta? [Criar conta grátis](#)

No primeiro acesso, a tela de boas-vindas confirma que a conta está pronta e mostra suas análises gratuitas. Clique em “Criar meu primeiro caso” para começar, ou “Ir para o painel”.

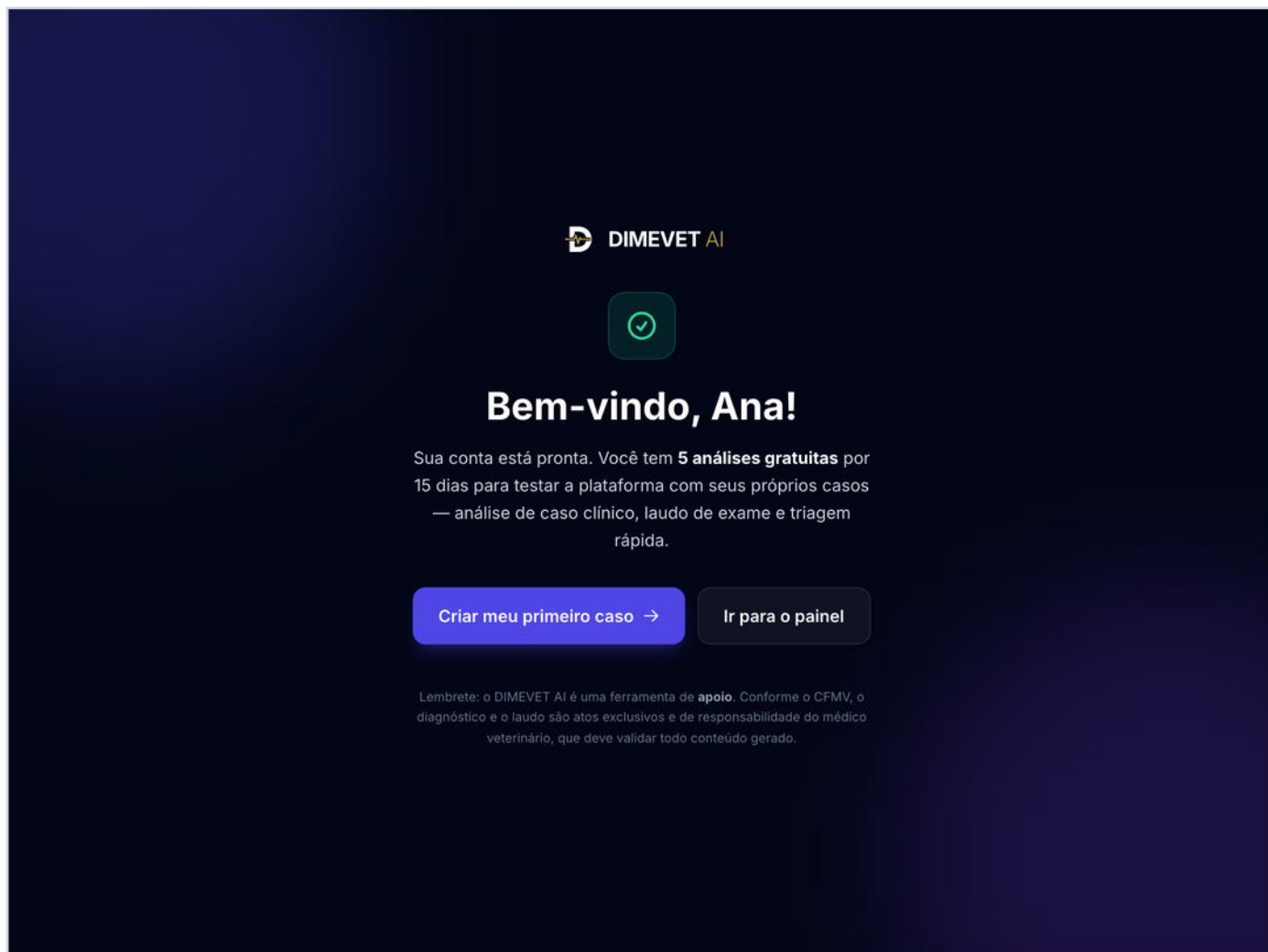

## 5 Painel (dashboard)

O painel reúne o uso do plano, as estatísticas dos casos (total, pendentes, em análise e analisados), os casos recentes e o link de indicação (indique e ganhe análises). Use “+ Novo Caso Clínico” para iniciar uma nova análise a qualquer momento.

**DIMEVET AI**  
Diagnóstico Inteligente em Medicina Veterinária

Dashboard

Casos Clínicos

+ Novo Caso

USO

Teste grátis

2 de 5 análises

Adquirir assinatura →

**Dra. Ana Souza**  
dra.ana@clinica.com.br

Sair

**Olá, Ana!**  
Visão geral dos seus casos clínicos veterinários

+ Novo Caso Clínico

TESTE GRÁTIS

2 de 5 análises

Teste válido por mais 12 dias

Adquirir assinatura →

TOTAL

3

casos cadastrados

PENDENTES

1

aguardando análise

ANALISANDO

0

em processamento

ANALISADOS

2

com análise IA

Indique e ganhe análises

Compartilhe seu link. A cada amigo que criar conta, **vocês dois ganham análises grátis extras.**

<http://www.dimevetai.com.br/cadastro/?ref=ANA2026>

Copiar link

Casos Recentes

**Thor**  
Cão • Golden Retriever

Analizado

7 anos 32.5 kg

Tosse seca há 2 semanas, cansaço aos esforços e episódios de...

03/08/2026, 11:20 2 arquivo(s) 1 análise(s)

**Mimi**  
Gato • Persa

Concluído

5 anos 4.1 kg

Emagrecimento, aumento do apetite e agitação.

02/08/2026, 06:10 1 arquivo(s) 1 análise(s)

**Bolinha**  
Cão • Poodle

Pendente

3 anos 8.2 kg

Vômito e apatia desde ontem.

04/08/2026, 04:00 0 arquivo(s) 0 análise(s)

O DIMEVET AI é uma ferramenta de apoio à decisão clínica e não realiza diagnóstico. Conforme o CFMV, o diagnóstico é ato exclusivo e de responsabilidade do médico veterinário. As análises por IA não substituem o exame clínico nem o julgamento do profissional responsável.

Termos de Uso e Privacidade

DIMEVET AI — Manual do Usuário

5

Escolha o tipo de auxílio. Em “Diagnóstico clínico”, informe os dados do paciente (espécie, raça, idade, peso), a anamnese (sintomas e histórico) e anexe exames complementares (imagens e PDFs). A IA gera interpretação clínica, diagnósticos diferenciais, recomendações e conduta.

  
Diagnóstico Inteligente em Medicina Veterinária

Dashboard

Casos Clínicos

**Novo Caso**

USO

Teste grátis

2 de 5 análises

Adquirir assinatura →

**Dra. Ana Souza**  
dra.ana@clinica.com.br

Sair

[← Voltar para Casos](#)

## Novo Caso Clínico

Preencha as informações do paciente e os sintomas observados.

ⓘ Esta é uma ferramenta de **apoio ao diagnóstico**, não um cadastro permanente. Para sua privacidade e conforme a LGPD, os casos e exames são **excluídos automaticamente após 30 dias**. Baixe o PDF da análise se quiser guardá-la.

**Tipo de auxílio**  
Escolha o tipo de relatório que a IA deve gerar.

**Diagnóstico clínico**  
Interpretação do caso, diagnósticos diferenciais e conduta.

**Laudo de exame**  
Descrição e conclusão de exames (eco, raio-X, US, ECG...).

**Triagem rápida**  
Resumo curto: parâmetros alterados, grau de risco e próximo passo.

**Informações do Paciente**

Nome do Paciente \*  
Ex: Rex, Mimi, Bolinha...

Espécie \*  
Selecione a espécie...

Raça  
Ex: Labrador, Persa, Sem Raça Definida...

Idade (anos)  
Ex: 3

Peso (kg)  
Ex: 12.5

**Anamnese**

Sintomas Principais \*  
Descreva os sintomas observados: vômito, diarreia, apatia, perda de apetite, tosse, etc.

Histórico Clínico  
Vacinações, vermifugações, cirurgias anteriores, doenças pré-existent, medicações em uso, dieta...

Foco da análise / observações para a IA (opcional)  
Ex: apoio para laudar o ecocardiograma, foco cardiológico; ou avaliar função renal a partir da bioquímica...

Dirigida a análise para um objetivo específico — útil, por exemplo, para apoio na elaboração de laudos especializados.

**Exames Complementares** (opcional)

  
Arraste arquivos ou clique para selecionar  
Imagens (JPG, PNG, GIF, HEIC/iPhone, TIFF, BMP, WEBP, AVIF), PDF, CSV, XLSX — máx. 20 MB por arquivo

Cancelar

**✓ Cadastrar Caso Clínico**

O DIMEVET AI é uma ferramenta de **apoio** à decisão clínica e **não realiza diagnóstico**. Conforme o CFMV, o diagnóstico é ato exclusivo e de responsabilidade do médico veterinário. As análises por IA não substituem o exame clínico nem o julgamento do profissional responsável.

[Termos de Uso e Privacidade](#)

DIMEVET AI — Manual do Usuário

6

## 7 Novo caso — Laudo de exame

Em “Laudo de exame”, selecione o Tipo de exame: Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Ultrassonografia, Radiografia, Análise Histopatológica ou Outro. Cada modalidade aplica as mensurações e os valores de referência específicos (por espécie). Opcionalmente, envie um laudo seu como modelo para a IA gerar no seu padrão.

  
Diagnóstico Inteligente em Medicina Veterinária

Dashboard

Casos Clínicos

**Novo Caso**

USO

Teste grátis

2 de 5 análises

Adquirir assinatura →

Dra. Ana Souza

dra.ana@clinica.com.br

Sair

[← Voltar para Casos](#)

### Novo Caso Clínico

Preencha as informações do paciente e os sintomas observados.

⌚

Esta é uma ferramenta de **apoio ao diagnóstico**, não um cadastro permanente. Para sua privacidade e conforme a LGPD, os casos e exames são **excluídos automaticamente após 30 dias**. Baixe o PDF da análise se quiser guardá-la.

**Tipo de auxílio**  
Escolha o tipo de relatório que a IA deve gerar.

**Diagnóstico clínico**  
Interpretação do caso, diagnósticos diferenciais e conduta.

**Laudo de exame**  
Descrição e conclusão de exames (eco, raio-X, US, ECG...).

**Triagem rápida**  
Resumo curto: parâmetros alterados, grau de risco e próximo passo.

**Tipo de exame**  
Aplica as mensurações e o padrão da modalidade.

Ecocardiograma

**Modelo de laudo** (opcional)  
Gera no seu padrão. Em branco, usamos o formato padrão.

Enviar arquivo

Cole um laudo modelo (opcional)...

**Informações do Paciente**

**Nome do Paciente \***  
Ex: Rex, Mimi, Bolinha...

**Espécie \***  
Selecione a espécie...

**Raça**  
Ex: Labrador, Persa, Sem Raça Definida...

**Idade (anos)**  
Ex: 3

**Peso (kg)**  
Ex: 12.5

**Anamnese**

**Sintomas Principais \***  
Descreva os sintomas observados: vômito, diarreia, apatia, perda de apetite, tosse, etc.

**Histórico Clínico**  
Vacinações, vermifugações, cirurgias anteriores, doenças pré-existentes, medicações em uso, dieta...

**Foco da análise / observações para a IA** (opcional)  
Ex: apoio para laudar o ecocardiograma, foco cardiológico; ou avaliar função renal a partir da bioquímica...  
Direcione a análise para um objetivo específico — útil, por exemplo, para apoio na elaboração de laudos especializados.

**Exames Complementares** (opcional)

Arraste arquivos ou clique para selecionar  
Imagens (JPG, PNG, GIF, HEIC/iPhone, TIFF, BMP, WEBP, AVIF), PDF, CSV, XLSX — máx. 20 MB por arquivo

Cancelar

**Cadastrar Caso Clínico**

O DIMEVET AI é uma ferramenta de **apoio** à decisão clínica e **não realiza diagnóstico**. Conforme o CFMV, o diagnóstico é ato exclusivo e de responsabilidade do médico veterinário. As análises por IA não substituem o exame clínico nem o julgamento do profissional responsável.

Termos de Uso e Privacidade

DIMEVET AI — Manual do Usuário

7

## 8 Novo caso — Triagem rápida

A “Triagem rápida” entrega um resumo curto e objetivo: parâmetros alterados, grau de risco e próximo passo. Ideal para a porta de entrada e para priorizar atendimentos em dias de movimento.



Diagnóstico Inteligente em Medicina Veterinária

Dashboard

Casos Clínicos

**Novo Caso**

USO

Teste grátis

2 de 5 análises

Adquirir assinatura →

**Dra. Ana Souza**  
dra.ana@clinica.com.br

Sair

[← Voltar para Casos](#)

### Novo Caso Clínico

Preencha as informações do paciente e os sintomas observados.

ⓘ Esta é uma ferramenta de **apoio ao diagnóstico**, não um cadastro permanente. Para sua privacidade e conforme a LGPD, os casos e exames são **excluídos automaticamente após 30 dias**. Baixe o PDF da análise se quiser guardá-la.

#### Tipo de auxílio

Escolha o tipo de relatório que a IA deve gerar.

**Diagnóstico clínico**  
Interpretação do caso, diagnósticos diferenciais e conduta.

**Laudo de exame**  
Descrição e conclusão de exames (eco, raio-X, US, ECG...).

**Triagem rápida**  
Resumo curto: parâmetros alterados, grau de risco e próximo passo.

#### Informações do Paciente

**Nome do Paciente \***

Ex: Rex, Mimi, Bolinha...

**Espécie \***

Selecione a espécie...

**Raça**

Ex: Labrador, Persa, Sem Raça Definida...

**Idade (anos)** **Peso (kg)**

Ex: 3 Ex: 12.5

#### Anamnese

**Sintomas Principais \***

Descreva os sintomas observados: vômito, diarreia, apatia, perda de apetite, tosse, etc.

**Histórico Clínico**

Vacinações, vermifugações, cirurgias anteriores, doenças pré-existentes, medicações em uso, dieta...

**Foco da análise / observações para a IA (opcional)**

Ex: apoio para laudar o ecocardiograma, foco cardiológico; ou avaliar função renal a partir da bioquímica...

Direcione a análise para um objetivo específico — útil, por exemplo, para apoio na elaboração de laudos especializados.

#### Exames Complementares (opcional)



Arraste arquivos ou clique para selecionar

Imagens (JPG, PNG, GIF, HEIC/iPhone, TIFF, BMP, WEBP, AVIF), PDF, CSV, XLSX — máx. 20 MB por arquivo

Cancelar

**✓ Cadastrar Caso Clínico**

O DIMEVET AI é uma ferramenta de **apoio** à decisão clínica e **não realiza diagnóstico**. Conforme o CFMV, o diagnóstico é ato exclusivo e de responsabilidade do médico veterinário. As análises por IA não substituem o exame clínico nem o julgamento do profissional responsável.

[Termos de Uso e Privacidade](#)

DIMEVET AI — Manual do Usuário

8

## 9 Resultado da análise

Ao abrir o caso, clique em “Gerar Análise IA”. Em segundos, o resultado aparece organizado em seções (interpretação, diferenciais, recomendações, conduta e observações). Baixe o PDF para arquivar. Lembrete: a análise é um apoio — o diagnóstico e o laudo são de responsabilidade do veterinário (CFMV).



Inteligência Artificial em Medicina Veterinária

[Dashboard](#)  
[Casos Clínicos](#)  
[Novo Caso](#)

USO

2 de 5 análises

[Adquirir assinatura](#)

 **Dra. Ana Souza**  
dra.ana@clinica.com.br

[Sair](#)

[Voltar para Casos](#)

**Thor** Analisado

Excluir Caso

ESPECIE

Cão

RAÇA

Golden Retriever

IDADE

7 anos

PESO

32.5 kg

ANÁLISE CLÍNICA

Análise Clínica por IA

+ Nova Análise

1 análise gerada

1

Análise #1

Mais recente

03 de agosto de 2026 às 11:25

Paciente: Thor • Cão • Golden Retriever • Macho • 7 anos • 32,5 kg

Interpretação Clínica

O conjunto de tosse seca, intolerância ao exercício e episódios de síncope em um cão idoso de raça grande, associado ao sopro cardíaco, sugere fortemente uma **cardiopatia com repercussão hemodinâmica**. O quadro é compatível com congestão e/ou redução do débito cardíaco.

Diagnósticos Diferenciais

2.1. Cardiomiopatia dilatada (CMD) — principal suspeita pela raça, idade e sinais de insuficiência.

2.2. Doença valvar degenerativa — possível, embora mais comum em raças pequenas.

2.3. Efusão pericárdica / neoplasia de base cardíaca — considerar dado o histórico de síncope.

Interpretação dos Exames

Radiografia torácica com aumento da silhueta cardíaca (VHS acima do limite para a espécie) e padrão compatível com congestão venosa pulmonar. Recomendada correlação com ecocardiograma para confirmação.

Recomendações Diagnósticas

• Ecocardiograma com Doppler (mensuração de FS, AE/Ao e diâmetros ventriculares).

• Eletrocardiograma para investigar arritmias associadas à síncope.

• Pressão arterial sistêmica e bioquímica renal.

Conduta Terapêutica

Conduta a ser definida pelo médico veterinário após confirmação ecocardiográfica; em geral inclui manejo da congestão e suporte inotrópico quando indicado.

Observações Importantes

Priorizar a investigação da causa da síncope pelo risco de morte súbita. Reavaliação clínica em curto prazo.

Baixar PDF

Sintomas Principais

Tosse seca há 2 semanas, cansaço aos esforços e episódios de desmaio.

Histórico Clínico

Sopro cardíaco detectado em consulta de rotina. Vacinação em dia.

Exames Complementares

2 arquivo(s)

Image

Clique para visualizar

Rx...

03/08/2026

Re...

03/08/2026

Adicionar novos exames:

Arraste arquivos ou clique para selecionar

Imagens (JPG, PNG, GIF, HEIC/iPhone, TIFF, BMP, WEBP, AVIF), PDF, CSV, XLSX — máx. 20 MB por arquivo

O DIMEVET AI é uma ferramenta de apoio à decisão clínica e não realiza diagnóstico. Conforme o CFMV, o diagnóstico é ato exclusivo e de responsabilidade do médico veterinário. As análises por IA não substituem o exame físico nem o julgamento do profissional responsável.

[Termos de Uso e Privacidade](#)

DIMEVET AI — Manual do Usuário

9